

横向きベルトは、 センサーとバイブレーターの働きで 使用者を『横向き』に寝かせる イビキ対策用の器具です

使用法は、とても簡単。
横向きベルトを腰に巻いて寝るだけ。

センサーがお腹の中央(おへそのあたり)に来るよう
に、ウエストの位置で締めます。

布団に入りスイッチを ON に。そのまま寝入ってく
ださい。



センサーは上向きで寝ているか、横向きで寝ている
かを判断します。

バイブレーターは、上向きで寝ているとの情報をセ
ンサーから受け取ると、振動し始めます。寝返りを
打ち、横向きになると振動はすぐに止まります。必
要以上の刺激を与えません。旅行のときなど、寝
巻きの下に付ければ、他の人に気付かれません。

●振動は、始めは弱く次第に強くなります。強さは
7段階あります。横向きになると直ぐに止まります。

ベルトはフリーサイズです。腹囲が135cmくら
いの方までご使用いただけます。使いやすい長
さにカットしてください。

横向きベルトをご愛用の木村様
(仮名、男性、63歳、埼玉県)に伺いました

——大きいびきでお悩みだったとか

木村 自分では分からないけれど、家族からは横向
きベルトを使うまでは大きくて時々呼吸も止まって
いたようです。

——横向きベルトは每晚お使いでしょうか

木村 ええ。使用感がいいので每晚して寝ています。

——上向きで寝るのが好きな方と、横向きが好き
な方がいますが、木村様はどちらでしょうか。

木村 上を向いて寝ないと寝付けませんね。

——上向きで寝る方の寝付きを邪魔しないため、ス
イッチを入れても寝返りを打つまでは振動しない作
りですが。

木村 はい。上向きでないと寝付けない私にとって、
ありがたい仕組みです。お陰で良く寝付けています。

——振動で目が覚めることはありませんか。

木村 ほとんどありません。トイレに行きたくて目
覚めた時に振動していた、なんてことはありませんけ
どね。

——目覚めはいかがですか。

木村 目が覚める回数がぐっと減って、朝「よく眠
れた！」と感じます。のどのカラカラ感がなくなり、
昼間のだるさや眠気も少なくなりました。1日スッ
キリ過ごしています。

——奥様のご感想は

木村 喜んでいます。「ベルトした？」と念を押され
ます。

——そのほか、お気づきのことはありませんか。

木村 横向きベルトをパジャマで隠すと人に知られ
ないので、旅行の時に重宝しています。

イビキ対策に 横向きベルト

¥19,440 (内消費税 ¥1,440)

- 仕様：センサー、バイブレーター、ベルトから成る。
- 重量……………198.5g (電池を含む)
- センサー……………ABS樹脂、サイズ72×60×25mm
- バイブレーター…ベルトの中に組み込み
- ベルト……………アクリル製のマジックテープ、幅46mm、長さ
1,500mm (フリーサイズ、体に合わせカット)
- 電池……………9V アルカリ乾電池 1個

1年保証

通常の使用によるものを
対象。電池は対象外です。

日本製